

rossmax

Modell: AS175


HU Használati útmutató



www.rossmax.com







Bevezetés

A kamrát egy kimért dózisé inhalációs készülékkel (MDI) való használatra tervezték orvos által előírt mennyiségű aeroszol gyógyszer adagolásához. Otthoni és kórházi használatra egyaránt megfelelő. Kizárólag egy páciens használhatja. Kapható: kisméretű arcmaszkkal: (0-1,5 éves korig); közepes méretű arcmaszkkal: (1-5 éves korig); nagyméretű arcmaszkkal (5 éveskor felett); szájcsutorával (5 éves kor felett).

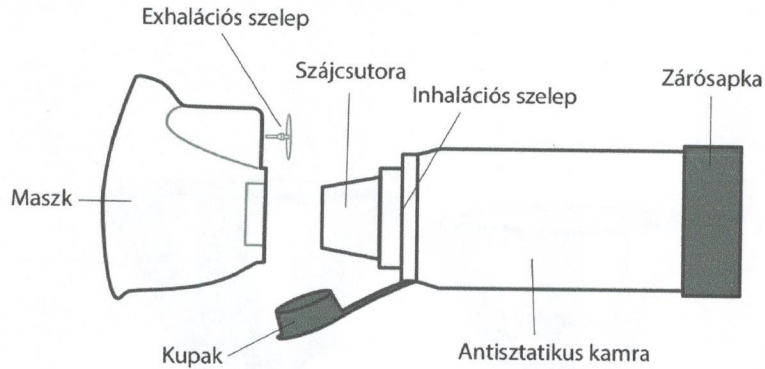

Használat

- 1 Használat előtt ellenőrizze a kamrát. Távolítsa el a benne levő idegen tárgyakat, ha vannak. Ha bármilyen sérülést észlel rajta, cserélje ki.
- 2 Távolítsa el a védősapkát az MDI-ről és a kamráról. Maszkkal való használat esetén csatlakoztassa a maszkot a szájcsutorához úgy, hogy szorosan zárjon. Illessze az MDI-t a kamra hátsó részébe és rázza meg.
- 3 Vegye a szájcsutorát a szájába úgy, hogy ajkai befogják azt. Nyomja a maszkot az arcához és ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen.
- 4 Lélegezzen ki nyugodtan. Nyomja meg az MDI elejét és kezdjen lassan inhalálni. Vegyen egy mély lélegzetvételt szájon keresztül. Tartsa benn lehetőleg 5-10 másodperc erejéig. Az MDI megnyomásától kezdve a 2-3 lélegzetvételen keresztül mindvégig tartsa az ajkait a szájcsutorán.
- 5 Lélegezzen ki nyugodtan. Nyomja meg az MDI-t és kezdjen lassan inhalálni, szorosan az archoz illesztve a maszkot az 5-6 levegővétel alatt az MDI megnyomását követően.
- 6 Kövesse az MDI-hez mellékelt útmutatóban leírtakat azzal kapcsolatban, hogy mennyit kell várni a 3-5. lépések megismétlése előtt.

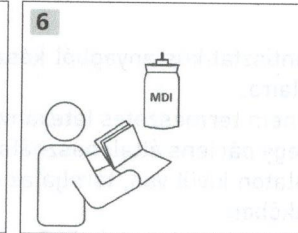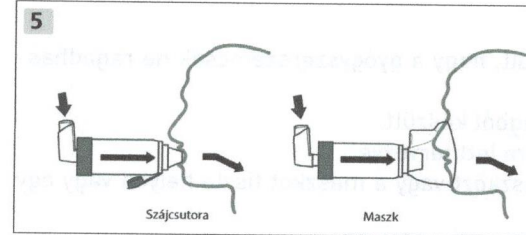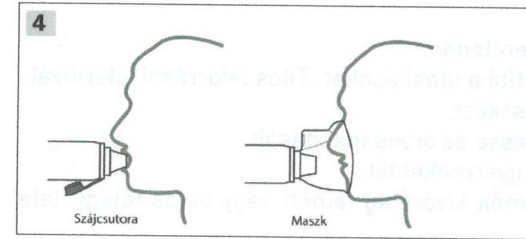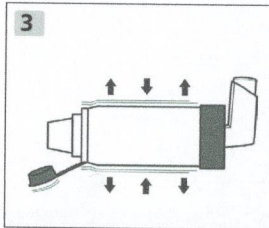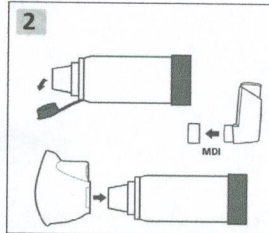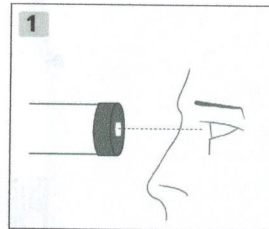

Az eszköz tisztítása

Javasolt a kamrát és a maszkot hetente tisztítani. Megjegyzés: Ne mozgassa vagy távolítsa el a szelepet tisztítás során.

- 1 Távolítsa el a szájcsutora kupakját és zárósapkát. Megjegyzés: Maszk használata esetén kérjük, vegye le a maszkot.
- 2 Áztassa az alkatrészeket 15 percen keresztül tisztítószert tartalmazó meleg vízbe. Mozgassa át őket, majd öblítse le.
- 3 Rázza ki a maradék vizet és hagyja megszáradni az eszközt szabad levegőn, álló helyzetben. Összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy az alkatrészek teljesen megszáradtak.
- 4 Összeszerelés során illessze a zárósapkát a kamra hátsó részére és illessze a szájcsutora kupakját a kamrára. A kupakot mindig helyezze a szájcsutorára ha az eszköz használaton kívül van. Megjegyzés: Maszk használata esetén illessze rá a maszkot szájcsutorára.

