


TRI-BALL TÜDŐTORNÁSZ


Használati utasítás és jótállási jegy

Vegye ki a Tri-Ballt a csomagolásból, és a gégecsövet a házból. Csatlakoztassa a gégecsövet a lélegeztető tréner aljához. A gyakorlat közben a készüléknek függőlegesen, a páciens arcával egy magasságban kell lennie.

Használat előtt és után a gégecsövet langyos vízzel öblítse át. Hagyja megszáradni és a következő használatig helyezze vissza a tartóra.

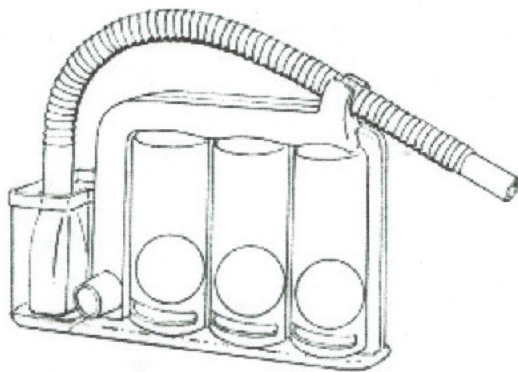

Álló pozíció

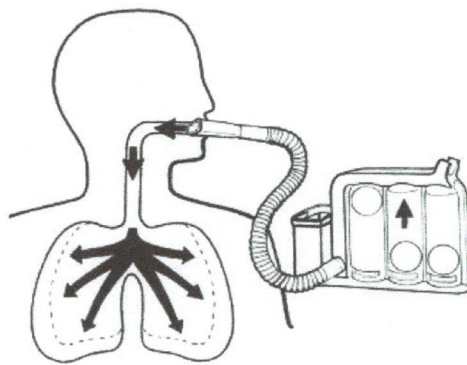

Használati pozíció

Használata:

1. Kezelés előtt lélegezzen egyenletesen, és vegye a szájába a gégecsövet és szorítsa enyhén az ajkaival.
2. Első fokozatképpen olyan erővel lélegezzen be, hogy csak az első labda emelkedjen fel. Addig tartsa ezt a pozíciót, amíg csak bírja. Addig a második és a harmadik labda maradjon a helyén.
3. Második fokozatképpen olyan erővel lélegezzen be, hogy már a második labda is felemelkedjen, csak a harmadik maradjon a helyén. A maximális belégzés eléréséhez mind a három labda emelkedjen meg.
4. Vegye ki a szájából a csövet és lélegezzen ki. Tartson kis szünetet, lélegezzen egyenletesen.
5. Ismételje a gyakorlatokat az orvos utasítása szerint.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet előírásai alapján cégünk az egyes fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló rendeletnek megfelelően a vásárlás napjától számított alább megjelölt jótállást és 24 hónapra szavatosságot vállal. A vásárlás napján a Forgalmazó és a Vásárló között Fogyasztási szerződés keletkezik. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti. A szerződés szempontjából a fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a forgalmazóval szerződést kötő személy. A jótállási idő elteltével a vásárlónak kell bizonyítani a hiba gyári eredetét. A reklamáció esetén a kereskedelmi egységben vagy a forgalmazónál jegyzőkönyvet kell felvenni a hibáról ill. a vásárló igényéről. A hiba elhárításának módjai: a./ javítás, b./ csere, c./ árszállítás, d./ vételár visszafizetés, ebben a sorrendben. Javítás esetén törekedni kell arra, hogy a termék javítása legfeljebb 15 napon belül befejeződjék és az a fogyasztónak jelentősebb kényelmetlenséget ne okozzon. Szennyeződéstől megtisztított terméket szabad javításra átadni. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, ill. a javító szolgálat a jótállási jegyben köteles feltüntetni a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát a javítás módját, a megjavított termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás a javítás időtartamával meghosszabbított új határidejét. A jótállást kizáró feltételek változatlanul érvényesek. A szavatossággal kapcsolatos jogokat a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza újra. Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetésszerű használatból, valamint a külső fizikai behatásokról eredő meghibásodásokra.
 Forgalmazó: Rextra Kft. 2000 Szentendre Rózsa u. 16. Tel.: 06 26 309-109
 Szerviz: Rextra Kft. 1031 Emőd u. 38.

Jótállás ideje: hó Gyári szám:
 A vásárlás időpontja: Aláírás, bélyegző: