

ECN001 - INHALÁTOR/ KOMPRESSZOROS NEBULIZÁTOR

MI NEBULIZÁTOR?

A kompresszoros nebulizátor egy olyan kompakt orvosi készülék, amely az orvos által előírt gyógyszer hörgőbe és tüdőbe való effektív szállítását biztosítja. Megfelelő használat és karbantartás mellett, több éven keresztül megbízható működést (kezeléseket) biztosít. A termék asztma, allergia és egyéb légúti betegség hatékony gyógyításához rendeltetett. Légáramot hoz létre, amely a porlasztó tiszta vezetékén keresztül halad át. Amikor a levegő a nebulizátorba jut, a benne levő gyógyszert szétporlasztott köddé alakítja át, amelyet könnyen be lehet lélegezni.

A kompresszoros nebulizátor szakképzett orvos és/vagy terapeuta / légzőszervi szakember felügyelete alatt használható. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen utasítást, hogy megismerje a készülék funkcióit. A jelen készülék csak a rendeltetésének megfelelően használható.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELEMMEL ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- A készüléket csak védőérintkezővel rendelkező aljzathoz csatlakoztassa.
- A készüléket élelmiszer háztartási feldolgozására szánták és gyártották. Üzleti célokra nem használható.
- Ne használja ipari környezetben, sem a szabadban!
- Az esetleges áramütés megakadályozásának érdekében a készüléket ne mossa folyó víz alatt, valamint ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz vagy nedvesség, illetőleg forró felülettel ne érintkezzen.
- A készülék konnektorból való kihúzását sohase a hálózati kábelt húzásával végezze. Ez az aljaz, vagy kábel meghibásodását okozhatja. Az egyik kezével támassza meg a konnektort, a másikkal húzza ki a dugót.
- A sérült tápkábelt csak márkaszerviz javíthatja. A készüléket hibás vezetékkel vagy csatlakozóval használni tilos.
- Áramütés elkerülése érdekében a készüléket soha ne javítsa sajátkezűleg házilag és ne módosítsa. A készülék bárminemű javításait márkaszervizre kell javítani. A készülék jótállási időszakon belül történő felnyitása a garancia érvénytelenítését vonja maga után.
- A légbefúvókat tartsa nyitva. A készüléket ne helyezze puha felületre, amely a légbefúvókat blokkolhatja.
- Amennyiben a tartály üres, ne kapcsolja be a készüléket.

Nebulizátor kompresszor

- 1) Ház
- 2) Fúvóka
- 3) Gyógyszer tartály
- 4) Légvezeték
- 5) Szájcsutora
- 6) Bekapcsoló gomb
- 7) Csatlakozó
- 8) Félhold alakú horony (tartó, amelyben az inhalátort inhalációk között kell elhelyezni)
- 9) Légszűrő és fedél
- 10) Légbefúvók
- 11) Tápkábel

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR HASZNÁLATA

Megjegyzés: Első használata előtt az inhalátort pontosan tisztítsa meg.

- Helyezze a készüléket vízszintesen egy stabil felületre. Győződjön meg arról, hogy ülve könnyel eléri a vezérlés valamennyi elemét.
- Az inhalátor szétszerelése érdekében óvatosan csavarja le a felső részét az óramutató járásával ellentétesen.
- Tegye az orvos által előírt gyógyszert a készülék alsó részébe. Győződjön meg arról, hogy a kúp az alsó részen belül helyezkedik el.
- Az inhalátor összeszerelése érdekében a tetejét tekerje óvatosan az óramutató járásának megfelelő irányban. Győződjön meg arról, hogy a részek jól összeillenek.
- A légvezeték egyik végét csatlakoztassa az inhalátor aljához.
- A légvezeték másik végét csatlakoztassa a kompresszor elején található kábelcsatlakozóhoz.
- A szájcsutorát vagy maszkot (igény szerint) csatlakoztassa az inhalátor felső részéhez.
- Csatlakoztassa a készüléket megfelelő feszültségű elektromos hálózatba. Ennek során győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló "OFF" állapotban van.
- A bekapcsoló gomb megnyomásával a készüléket bekapcsolja.

Fontos:

A kompresszor motorja hővédővel felszerelt, amely a készüléket kikapcsolja, ha az túlmelegszik. Amikor a hővédő kikapcsolja a készüléket:

+ a készüléket kapcsolja ki.

+ a készüléket húzza ki a konnektorból.

+ a készülék ismételt használata előtt várjon 30 percet, míg a motor lehűl.

Győződjön meg arról, hogy a légbefúvók nincsenek letakarva. Használata után a készüléket kapcsolja ki, a tápkábelt húzza ki a az elektromos hálózathoz.

TISZTÍTÁS

Minden használat után az inhalátort, szájcsontot és maszkot mossa meg meleg vízzel, az adott nap végén az utolsó kezelés után pedig enyhe mosószerrel.

Amennyiben az orvos vagy légúti szakember más tisztítási eljárást rendel el, utasításait kell követni.

Öblítés (minden kezelés után):

1) A légszűrőt, inhalátort, szájcsontot és maszkot kapcsolja szét.

2) Az inhalátort óvatosan tekerje el, hogy kinyissa.

3) A porlasztót, szájcsontot és maszkot öblítse le (vízzel).

4) Száraz puha törülközővel törölje szárazra és hagyja száradni.

5) Amikor teljesen megszáradt a porlasztót szerelje össze és a többi alkatrészrel helyezze száraz, zárt dobozba.

Fertőtlenítés:

Az inhalátor fertőtlenítése érdekében a következő utasítást kövesse, kivéve, ha az orvos másként rendelkezik: Ajánlott, hogy a készüléket az adott nap utolsó kezelését követően fertőtlenítse.

- Használjon ecetoldatot desztillált vízben (1: 3 arányban). Győződjön meg arról, hogy az oldat mennyisége elegendő az inhalátor, szájcsontra és maszk vízbe merítéséhez.

- Öblítse le - 1-3 lépések

- Az inhalátort, szájcsontot és maszkot mossa meg meleg vízzel és enyhe mosószerrel. Ezt követően mossa meg meleg vízzel.

- A részeket harminc percre merítse ecet vizes oldatába.

- Öblítse le - 3-5 lépések

Kompresszor tisztítása:

- Minden nap nedves kendővel törölje meg.

- Ne használjon poralakú tisztítószeret vagy szilárd szappanokat, ezek a felületet károsíthatják.

Légszűrő csere:

- Ne használjon pamutot vagy más anyagot. A légszűrőt nem mossa, és ne tisztítsa. Kizárólag a forgalmazó által szállított légszűrőt használjon. A készüléket légszűrő nélkül ne indítsa el.

- A légszűrőt cserélje 30 naponta, vagy amikor elhasználódik.

TÁROLÁS

- A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol magas a hőmérséklet vagy nagy a páratartalom. A készüléket napsugarak hatása előtt védje.
- A készüléket gyermekek előtt tartsa védve.
- Amikor a készüléket nem használja, mindig húzza ki a hálózathoz.

SPECIFIKÁCIÓ

Tápellátás: 220V, 50 Hz

Áram: 0,8A

Kapacitás / gyógyszer mennyiség: 10 ml

Részecskeméret: 0,5 - 10 µm

Zajszint: <55 dBA

Átlagos permetezési szint: 0.4ml/perc

Kompresszornyomás tartomány: 44 - 55 Psi (300 - 380 KPa / 3 - 3,8 bar)

Üzemi nyomás tartomány: 8 - 16 Psi (50 - 100 KPa / 0,5 - 1,0 bar)

Áramlás tartomány: 12L/perc

Üzemi hőmérséklet tartomány: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)

Üzemi nedvesség tartomány: 10 - 95% RH

Tárolási hőmérséklet tartomány: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Alap felszerelés: Porlasztó, Légvezeték, Felnőtt maszk, Gyermekek maszk, Szájcsutóra.